

SLISHMAN PRESSURE WRAP - Más que un control de hemorragia

instrucciones de uso

1. Pase el lazo del vendaje de presión sobre el miembro lesionado y aplíquelo sobre la lesión (o simplemente enróllelo en el caso de un miembro atrapado).
2. Ajuste la manga roja hasta que quede ceñida.
3. Utilice una envoltura ancha para las heridas/cortaduras largas, o una envoltura estrecha y ajustada para las hemorragias más graves (Aplíquela entre la lesión y el corazón).
4. Enrolle el vendaje de presión hasta la etiqueta blanca, y luego fije los ganchos al vendaje.
5. Anote el tiempo de aplicación en la etiqueta blanca.
6. Ajuste la tensión del vendaje para minimizar el dolor, mientras se vigila la hemorragia, los pulsos, la sensibilidad y la función motora.
7. Mantener el vendaje en su sitio hasta que se pueda realizar el tratamiento definitivo de la herida lo antes posible.



Escanear para ver
vídeo de instrucciones



www.SlishmanPressureWrap.com

Fabricado en Pakistán | Lot #TS202201

US Patent No. 11,246,602

*No aplicar en el cuello.

**También es útil para proteger las heridas, estabilizar las extremidades o mantener las férulas en su sitio.