

# QUIKLITTER™

REF #50-0442

## Multi-Use Disposable Litter

Zwarte Handvaten

Draagvermogen 226kg

Afmetingen: 183x68 cm

Gewicht: 454gr



**RESCUE ESSENTIALS**

[www.rescue-essentials.com](http://www.rescue-essentials.com)

[info@rescue-essentials.com](mailto:info@rescue-essentials.com) | 910-830-0286



 Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials  
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA



MedEnvoy Global B.V.  
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123 2595AM  
The Hague, The Netherlands



# QuikLitter™ Instructie

De QuikLitter™ is geschikt om patiënten tot 500 pond (226 kg) te vervoeren. Het wordt aanbevolen om een patiënt met ten minste 4 personen te dragen voor veilig transport en overdracht. De kans op een ongeval of letsel wordt hiermee geminimaliseerd. Het gebruik van de QuikLitter™ wordt niet aanbevolen bij een instabiliteit van de wervelkolom. Onjuiste behandeling of gebruik van een beschadigde QuikLitter™ kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben. Volg alle instructies voor het beste resultaat.

## CONTRA-INDICATIES EN WAARSCHUWINGEN

- Gebruik de QuikLitter™ niet als deze overmatig versleten of doorboord is.
- Vermijd contact met scherpe voorwerpen.
- Sleep de QuikLitter™ niet over ruwe oppervlaktes.
- Gebruik en bewaar de QuikLitter™ niet in een omgeving die warmer wordt dan 88°C.
- Niet te gebruiken in combinatie met mechanische liften voor zowel verticaal als horizontaal hijsen.

## PATIENTEN BEHANDELING

- Overschrijd het draagvermogen van 226 kg niet.
- Gebruik minimaal 4 personen om de patiënt op te tillen.
- Zorg voor de juiste grijptechniek voordat u de patiënt optilt.


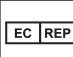






## REINIGING

- Bij bevulling kan de QuikLitter™ worden gereinigd met een vochtige doek met zeep, afwasmiddel of een mild ontsmettingsmiddel.
- Niet in de wasmachine wassen.
- Als de stretcher verontreinigd is, plaats het dan in een rode zak voor biologisch gevaarlijk afval en voer het af volgens het protocol voor gevaarlijk afval.
- Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaak- of desinfectiemiddelen.

## BEDOELD GEBRUIK

De QuikLitter™ is bedoeld voor gebruik door zorgprofessionals voor de stabilisatie, transport en verplaatsen van patiënten. Vanwege de lichtgewicht en compacte constructie van de stretcher is het vooral handig in sobere omgevingen waar snelle evacuatie van slachtoffers nodig is.

*Opmerking: Elk ernstig incident met betrekking tot de stretcher moet worden gemeld aan Tri-Tech Forensics en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.*

 MD	Medical Device	 EC REP	Authorized European Representative	 LOT	Lot Number	 PK	Country Code
 LATEX	Not Made with Natural Rubber Latex		Manufacturer		Consult Instructions For Use		Date of Manufacture