

QUIKLITTER™

REF #50-0442

Maca descartável multiuso

Alças vermelhas

Avaliado para: 500 libras (226 kg)

Tamanho: 72" x 27"

Peso: 16 oz (450ml+-)



RESCUE ESSENTIALS

www.rescue-essentials.com

info@rescue-essentials.com | 910-830-0286



Manufactured by Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA



bcmedical, Estrada Municipal Casa
79 Lourosa de Cima, Viseu, 3500-891 Portugal



EC REP

MedEnvoy Global B.V., Prinses Margrietplantsoen 33,
Suite 123 2595AM The Hague, The Netherlands

MD



LOT



Instruções QuikLitter™

QuikLitter™ foi projetado para transportar até 500 libras (226 kg). Recomenda-se usar pelo menos quatro pessoas para garantir transporte e transferência seguros, minimizando a possibilidade de acidentes ou ferimentos. Não recomendado quando a estabilidade da coluna é um problema. Manuseio ou uso inadequado de QuikLitter pode resultar em morte ou ferimentos graves. Siga todas as instruções para obter melhores resultados.

CONTRA-INDICAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- Não use o QuikLitter™ se a unidade estiver excessivamente desgastado ou perfurado
- Evite contacto com objetos pontiagudos.
- Evite arrastar o QuikLitter™ sobre superfícies ásperas.
- Não armazene o QuikLitter™ em contacto com fontes de calor superiores a 190°F.
- Não deve ser utilizado em conjunto com qualquer tipo de elevadores mecânicos, quer verticais ou movimento horizontal.

TRATAMENTO DE PACIENTES

- Não exceda a capacidade de carga de 500 libras.
- Use um mínimo de 4 pessoas para levantar o paciente.
- Garanta uma técnica de prensão adequada antes de levantar o paciente.










LIMPEZA

- QuikLitter™ sujo pode ser limpo com um pano húmido com sabão, detergente ou um desinfetante suave.
- Não lavar na máquina.
- Se todo o dispositivo estiver contaminado, coloque-o em um saco vermelho para risco biológico e descarte-o de acordo com seu protocolo de resíduos perigosos.
- Evite o uso de detergentes ou desinfetantes agressivos.

USO PRETENDIDO

QuikLitter™ destina-se ao uso por profissionais de saúde para estabilização geral do paciente, transporte e transferência. Devido à construção leve e compacta do dispositivo, é especialmente útil em ambientes austeros onde são necessárias evacuações rápidas de vítimas.

Aviso: Qualquer incidente grave que ocorreu em relação este dispositivo deve ser relatado para Tri-Tech Forensics e o Autoridade Competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou paciente está estabelecido.

 MD	Medical Device	 EC REP	Authorized European Representative	 LOT	Lot Number	 PK	Country Code		Importer
 LATEX	Not Made with Natural Rubber Latex		Manufacturer		Consult Instructions For Use		Date of Manufacture		