

QUIKLITTER XL™

REF #50-0449

Víceúčelová jednorázová nosítka

Nosnost: 1000 lb (453 kg)

Velikost: 80" x 40" (cca 180 cm x 90 cm)


Hmotnost: 1.8 lb (cca 800g)



RESCUE ESSENTIALS

www.rescue-essentials.com

info@rescue-essentials.com | 910-830-0286

 Vyrobeno Tri-Tech Forensics, Inc dba Rescue Essentials
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA



EC REP

MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague, The Netherlands



LOT

MD



QuikLitter XL™ Návod k použití

QuikLitter XL™ je určen pro přepravu až 1000 lb (453 kg). Pro zajištění bezpečného přesunu a minimalizace možnosti nehody nebo zranění se doporučuje využít alespoň čtyři osoby. Nedoporučuje se při problémech se stabilitou páteře. Nesprávná manipulace nebo použití poškozeného QuikLitter XL™ může mít za následek smrt nebo vážné zranění. Pro dosažení nejlepších výsledků dodržujte všechny pokyny.

KONTRAINDIKACE A VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte QuikLitter XL™, pokud je silně opotřebované nebo proražené.
- Vyhněte se kontaktu s ostrými předměty.
- Netahejte QuikLitter XL™ přes nerovné povrchy.
- Neskladujte QuikLitter XL™ v blízkosti zdroje tepla nad 190°F (88°C).
- Nesmí se používat ve spojení s jakýmkoliv typem mechanických zvedáků pro vertikální nebo horizontální pohyb.

MANIPULACE S PACIENTEM





- Nepřekračujte nosnost 1000 lb (453 kg).
- Ke zvednutí pacienta použijte minimálně 4 osoby.
- Před zvednutím pacienta zajistěte správnou techniku uchopení.
- Před zvednutím pacienta se ujistěte, že jsou upevňovací popruhy správně zapnuté.

ČIŠTĚNÍ

- Znečištěný QuikLitter XL™ lze čistit vlhkým hadříkem s mýdlem, saponátem nebo jemným dezinfekčním prostředkem.
- Neperte v pračce.
- Pokud jsou nosítka kontaminována, vložte je do červeného sáčku na biologický odpad a zlikvidujte v souladu s protokolem o nakládání s nebezpečným odpadem.
- Nepoužívejte agresivní čisticí a dezinfekční prostředky.

ÚČEL POUŽITÍ

QuikLitter XL™ je určen pro použití zdravotníky pro celkovou stabilizaci, transport a převoz pacienta. Díky lehké a kompaktní konstrukci prostředek je užitečný zejména v náročných prostředích, kde je nutná rychlá evakuace zraněných.

 MD	Zdravotnický prostředek	 EC REP	Autorizovaný evropský zástupce	 LOT	Číslo šarže	 PK	Kód země		Rozdávka
 LATEX	Není vyrobeno z přírodního latexu		Výrobce	 i	Přečtěte si návod k použití		Datum výroby		

Upozornění: Jakýkoli vážný incident, ke kterému dojde v souvislosti s tímto prostředkem, by měl být nahlášen společnosti Tri-Tech Forensics a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém se uživatel a/nebo pacient nachází.