

QUIKLITTER XL™

REF #50-0449

Rettungs-/Tragetuch

Tragfähigkeit: 453 kg

Größe: 203,2 cm x 101,6 cm

Gewicht: 816 g



RESCUE ESSENTIALS

www.rescue-essentials.com

info@rescue-essentials.com | 910-830-0286

Hergestellt durch Tri-Tech Forensics, Inc dba Rescue Essentials
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA

DE & AT WERO GmbH & Co. KG Idsteiner Straße 94
D-65232 Taunusstein +49 6128 9757-0 info@wero.de www.wero.de



EC REP

MedEnvoy Global B.V., Prinses Margrietplantsoen 33,
Suite 123 2595AM The Hague, The Netherlands



LOT

QuikLitter XL™ Anleitung

Der QuikLitter XL™ ist für den Transport von bis zu 453 kg bemessen. Es wird empfohlen, für Transport und Transfer mindestens vier Personen einzusetzen, um die Möglichkeiten eines Unfalls oder von Verletzungen zu minimieren. Nicht empfohlen, wenn die Wirbelsäulenstabilität eine Rolle spielt. Die unsachgemäße Handhabung oder Nutzung eines beschädigten QuikLitter XL™ kann zum Tod oder schweren Verletzungen führen. Bitte befolgen Sie alle Anweisungen.

KONTRAINDIKATIONEN UND WARNHINWEISE

- Verwenden Sie den QuikLitter XL™ nicht, wenn das Gerät übermäßig abgenutzt oder durchlöchert ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Objekten.
- Vermeiden Sie das Ziehen des QuikLitter XL™ über raue Oberflächen.
- Lagern Sie den QuikLitter XL™ nicht in Kontakt mit Wärmequellen von mehr als 88°C.
- Nicht zu verwenden in Verbindung mit sonstigen mechanischen Hebevorrichtungen mit vertikaler oder horizontaler Bewegung.

PATIENTENTRANSPORT




- Überschreiten Sie nicht die Tragfähigkeit von 453 kg.
- Patienten mit mindestens 4 Personen heben.
- Stellen Sie eine geeignete Grifftechnik sicher, bevor Sie den Patienten anheben.
- Stellen Sie sicher, dass die Haltegurte festsitzen, bevor Sie den Patienten anheben.

REINIGUNG

- Wenn er verschmutzt ist, kann der QuikLitter XL™ mit einem feuchten Tuch mit Seife, Waschmittel oder einem milden Desinfektionsmittel gereinigt werden.
- Nicht in der Waschmaschine waschen.
- Wenn das gesamte Gerät kontaminiert ist, legen Sie es in einen roten Risikoabfallsack und entsorgen Sie es entsprechend
- Ihres Protokolls für Gefahrstoffabfälle.
- Vermeiden Sie den Einsatz von scharfen Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln.

VORGESEHENE NUTZUNG

Die QuikLitter XL™ ist für den Einsatz durch medizinisches Fachpersonal für die allgemeine Patientenstabilisierung, Transport und Transfer gedacht. Aufgrund des leichten Gewichts und der kompakten Bauweise des Rettungs-/Tragetuch eignet es sich besonders für harte Umgebungen, in denen eine schnelle Evakuierung notwendig ist.

 MD	Medizinprodukt	 EC REP	Bevollmächtigter in der europäischen Gemeinschaft	 LOT	Fertigungsnummer, Charge	 PK	Länder-Code		Importeur
 LATEX	Enthält kein Naturkautschuk-latex		Hersteller		Gebrauchsanweisung beachten		Herstellungsdatum		

Hinweis: Jeder schwere Zwischenfall, der sich in Bezug auf dieses Rettungs-/Tragetuch ereignet, sollte an Tri-Tech Forensics und die zuständige Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Nutzer und/oder der Patient ansässig sind, gemeldet werden.