

QUIKLITTER XL™

REF #50-0449

Multi-Use Disposable Litter

Rated to 1000 lbs (453 kg)

Size: 80" x 40" Weight: 2 lbs 5 oz



RESCUE ESSENTIALS

www.rescue-essentials.com

info@rescue-essentials.com | 910-830-0286

 Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague, The Netherlands



QuikLitter XL™ Návod na použitie

QuikLitter XL™ je určený na prepravu až 453 kg. Na zaistenie bezpečnej prepravy a presunu sa odporúča využiť aspoň štyri osoby, čím sa minimalizuje riziko nehody alebo zranenia. Neodporúča sa, keď je problémom stabilita chrbtice. Nesprávna manipulácia alebo použitie poškodeného QuikLitter XL™ môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie. Na dosiahnutie najlepších výsledkov dodržiavajte všetky pokyny.

KONTRAINDIKÁCIE A UPOZORNENIA

- Nepoužívajte QuikLitter XL™ ak je jednotka nadmerne opotrebovaná alebo prepichnutá.
- Vyhnite sa kontakt s ostrými predmetmi.
- Vyhnite sa ťahaním QuikLitter XL™ cez drsné povrchy.
- Neuchovávajte QuikLitter XL™ v kontakte so zdrojmi tepla nad 190°F.
- Nepoužívajte v spojení s akýmkoľvek typom mechanických zdvíhačkov pre ktorýkoľvek vertikálny alebo horizontálny pohyb.

ZAOBCHÁDZANIE S PACIENTOM









- Neprekračujte nosnosť 453 kilogramov.
- Na zdvihnutie pacienta použite minimálne 4 osoby.
- Pred zdvíhaním pacienta zaistite správnu techniku uchopenia.
- Pred zdvíhaním pacienta sa uistite, že sú zadržiacie popruhy správne zapnuté.

ČISTENIE

- Špinavý QuikLitter XL™ možno čistiť vlhkou handričkou s mydlom, čistiacim prostriedkom alebo jemným dezinfekčným prostriedkom.
- Neumývajte v práčke.
- Ak je celé zariadenie kontaminované, vložte ho do červeného vrečka na biologický odpad a zlikvidujte podľa pokynov k vášmu protokolu o nebezpečnom odpade.
- Vyhnite sa používaniu drsných čistiacich alebo dezinfekčných prostriedkov.

ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

QuikLitter XL™ je určený na použitie zdravotníkmi pracovníkmi na všeobecnú stabilizáciu pacienta, transport a presun. Vďaka ľahkej a kompaktnej konštrukcii zariadenia je obzvlášť užitočné v strohých prostrediach, kde je potrebná rýchla evakuácia obetí.

 MD	Medical Device	 EC REP	Authorized European Representative	 LOT	Lot Number	 PK	Country Code
 LATEX	Not Made with Natural Rubber Latex		Manufacturer		Consult Instructions For Use		Date of Manufacture

Upozornenie: Akýkoľvek vážny incident, ktorý sa vyskytol v súvislosti s týmto zariadením, by mal byť nahlásený Tri-Tech Forensics a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient sídlo.