

# QUIKLITTER™

REF #50-0583

## Multifunktionell engångsbår

Svarta handtag

Byggd för 226 kg

Storlek: 183 x 68,5 cm

Vikt: 454 g



**RESCUE ESSENTIALS**

[www.rescue-essentials.com](http://www.rescue-essentials.com)

[info@rescue-essentials.com](mailto:info@rescue-essentials.com) | 910-830-0286

 Tillverkad av Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials  
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA

 Promoteq AB Västerled 30 Sandviken, Sverige SE 811 37  
Telefon: +4626-27 40 90

  MedEnvoy Global B.V., Prinses Margrietplantsoen 33,  
Suite 123 2595AM The Hague, The Netherlands

MD

~~LATEX~~



LOT



# QuikLitter™ Instruktioner

QuikLitter™ är tillverkad för att transportera laster upp till 226 kg. Det rekommenderas att använda minst fyra personer för att säkerställa säker transport och förflyttning, för att minimera risken för olycka eller skada. QuikLitter™ rekommenderas inte i de fall patientens ryggradsstabilitet är ett problem. Felaktig hantering eller användning av skadad QuikLitter™ kan leda till dödsfall eller allvarlig skada. Följ alla instruktioner för bästa resultat.

## KONTRAINDIKATIONER OCH VARNINGAR

- Använd inte QuikLitter™ om varan är överdrivet sliten eller punkterad.
- Undvik kontakt med vassa föremål.
- Undvik att dra QuikLitter™ över ojämna ytor.
- Förvara inte QuikLitter™ i kontakt med värmekällor över 87°C.
- Lyft av QuikLitter™ ska inte utföras med hjälp av någon typ av mekanisk lyft, varken för vertikala eller horisontella förflyttningar.

## PATIENTHANTERING

- Överskrid inte lastkapaciteten på 226 kg.
- Använd minst 4 personer för att lyfta patienten.
- Säkerställ korrekt greppteknik innan patienten lyfts.










## RENGÖRING

- Rengör smutsiga QuikLitter™ med en fuktig trasa med tvål, rengöringsmedel, eller ett mildt desinfektionsmedel.
- Tvätta inte i maskin.
- Om hela QuikLitter™ är förorenad, placera den i en röd påse för biologiska risker och kassera enligt ditt protokoll för farligt avfall.
- Undvik att använda starka rengöringsmedel eller desinfektionsmedel.

## AVSEDD ANVÄNDNING

QuikLitter™ är avsedd att användas av sjukvårdspersonal för allmän patientstabilisering, transport och förflyttning. På grund av enhetens lätta och kompakta konstruktion är den särskilt användbar i stränga miljöer där snabba evakueringar krävs.

*Observera: Alla allvarliga incidenter som har inträffat i samband med denna vara ska rapporteras till Tri-Tech Forensics och den behöriga myndigheten i det land där användaren och/eller patienten är etablerad.*

 MD	Medical Device	 EC REP	Authorized European Representative	 LOT	Lot Number	 PK	Country Code		Importer
 LATEX	Not Made with Natural Rubber Latex		Manufacturer		Consult Instructions For Use		Date of Manufacture		