

# QUIKLITTER™ LITE

REF #50-0469

Víceúčelové jednorázové nosítka

Nosnost: 750 lb (340 kg)

Velikost: 74" x 27" (cca 188cm x 69 cm)

Hmotnost: 12 oz (cca 340g)



**RESCUE ESSENTIALS**

[www.rescue-essentials.com](http://www.rescue-essentials.com)

[info@rescue-essentials.com](mailto:info@rescue-essentials.com) | 910-830-0286



Vyrobeno Tri-Tech Forensics, Inc dba Rescue Essentials  
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA



EC REP

MedEnvoy Global B.V. Prinses  
Margrietplantsoen 33, Suite 123  
2595AM The Hague, The Netherlands



LOT



# QuikLitter™ Lite Návod k použití

The QuikLitter™ Lite je určen pro přepravu až 750 lb (340 kg). Pro zajištění bezpečného přesunu a minimalizace možnosti nehody nebo zranění se doporučuje využít alespoň čtyři osoby. Nedoporučuje se při problémech se stabilitou páteře. Nesprávná manipulace nebo použití poškozeného QuikLitter™ Lite může mít za následek smrt nebo vážné zranění. Pro dosažení nejlepších výsledků dodržujte všechny pokyny.

## KONTRAINDIKACE A VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte QuikLitter™ Lite, pokud je silně opotřebované nebo proražené.
- Vyhnete se kontaktu s ostrými předměty.
- Netahejte QuikLitter™ Lite přes nerovné povrchy.
- Neskladujte QuikLitter™ Lite v blízkosti zdroje tepla nad 190°F (88°C).
- Nesmí se používat ve spojení s jakýmkoliv typem mechanických zvedáků pro vertikální nebo horizontální pohyb.

## MANIPULACE S PACIENTEM

- Nepřekračujte nosnost 750 lb.
- Ke zvednutí pacienta použijte minimálně 4 osoby.
- Před zvednutím pacienta zajistíte správnou techniku uchopení.










## ČIŠTĚNÍ

- Znečištěný QuikLitter™ Lite lze čistit vlhkým hadříkem s mýdlem, saponátem nebo jemným dezinfekčním prostředkem.
- Neperte v pračce.
- Pokud jsou nosítka kontaminována, vložte je do červeného sáčku na biologický odpad a zlikvidujte v souladu s protokolem o nakládání s nebezpečným odpadem.
- Nepoužívejte agresivní čistící a dezinfekční prostředky.

## ÚČEL POUŽITÍ

QuikLitter™ Lite je určen pro použití zdravotníky pro celkovou stabilizaci, transport a převoz pacienta. Díky lehké a kompaktní konstrukci prostředek je užitečný zejména v náročných prostředích, kde je nutná rychlá evakuace zraněných.

*Upozornění: Jakýkoli vážný incident, ke kterému dojde v souvislosti s tímto prostředkem, by měl být nahlášen společnosti Tri-Tech Forensics a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém se uživatel a/nebo pacient nachází.*

 MD	Zdravotnický prostředek	 EC REP	Autorizovaný evropský zástupce	 LOT	Číslo šarže	 PK	Kód země		Rozdělovac
 LATEX	Není vyrobeno z přírodního latexu		Výrobce		Přečtěte si návod k použití		Datum výroby		

**RESCUE ESSENTIALS**

[www.rescue-essentials.com](http://www.rescue-essentials.com)

910-830-0286 | [info@rescue-essentials.com](mailto:info@rescue-essentials.com)