

# QUIKLITTER™ LITE

REF #50-0469

## Multi-Use Disposable Litter

Rated to 750 lbs (340 kg)

Size: 72" x 27" Weight: 13 oz



**RESCUE ESSENTIALS**

[www.rescue-essentials.com](http://www.rescue-essentials.com)

[info@rescue-essentials.com](mailto:info@rescue-essentials.com) | 910-830-0286



Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials  
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA



EC REP

MedEnvoy Global B.V.  
Prinses Margrietplantsoen 33,  
Suite 123 2595AM The Hague  
The Netherlands



LOT



# INSTRUCTIONS pour le Quiklitter™ Lite

Le QuikLitter™ Lite est conçu pour le transport jusqu'à 226 kg. Il est recommandé d'utiliser au moins quatre personnes pour assurer un transport et un transfert en toute sécurité, minimisant les risques d'accident ou de blessure. Déconseillé lors d'atteinte de la colonne vertébrale.

## CONTRAINDICATIONS AND WARNINGS

- Ne pas utiliser le Quiklitter™ Lite s'il est excessivement usé ou perforé.
- Éviter tout contact avec des objets pointus.
- Évitez de traîner sur des surfaces rugueuses.
- Ne pas stocker en contact avec des sources de chaleur supérieures à 90°C.
- Ne doit pas être utilisé avec aucun élévateur mécanique pour un mouvement vertical ou horizontal.

## Manipulation du patient

- Ne pas dépasser la capacité de charge de 226 Kg.
- Utilisez un minimum de 4 personnes pour soulever le patient.
- Assurer une technique de préhension appropriée avant de soulever le patient.


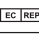






## Nettoyage

- Le produit souillé peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide avec du savon, un détergent ou un désinfectant doux.
- Ne pas laver en machine.

## UTILISATION PRÉVUE

Le QuikLitter™ Lite est destiné à être utilisé par les professionnels de la santé pour la stabilisation, le transport et le transfert généraux des patients. En raison de la construction légère et compacte de l'appareil, il est particulièrement utile dans les environnements austères où des évacuations rapides des blessés sont nécessaires.

*Avis : Tout incident grave survenu en relation avec cet appareil doit être signalé à Tri-Tech Forensics et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.*

 MD	Medical Device	 EC REP	Authorized European Representative	 LOT	Lot Number	 PK	Country Code
 LATEX	Not Made with Natural Rubber Latex		Manufacturer		Consult Instructions For Use		Date of Manufacture

**RESCUE ESSENTIALS**

www.rescue-essentials.com

910-830-0286 | info@rescue-essentials.com

01-1048R1