

# QUIKLITTER™ LITE

REF #50-0582

## Rettungs-/Tragetuch

Tragfähigkeit: 340 kg

Größe: 187.96 cm x 68.58 cm

Gewicht: 340 g



**RESCUE ESSENTIALS**

[www.rescue-essentials.com](http://www.rescue-essentials.com)

[info@rescue-essentials.com](mailto:info@rescue-essentials.com) | 910-830-0286



Hergestellt für Tri-Tech Forensics, Inc dba Rescue Essentials  
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA



DE + AT: WERO GmbH & Co. KG, Idsteiner Str. 94, D-65232 Taunusstein,  
+49 6128-9757-0, [info@wero.de](mailto:info@wero.de), [www.wero.de](http://www.wero.de)



EC REP

MedEnvoy Global B.V., Prinses Margrietplantsoen  
33, Suite 123 2595AM The Hague, The Netherlands



LOT



# QuikLitter™ Lite Anleitung

Der QuikLitter™ Lite ist für den Transport von bis zu 340 kg bemessen. Es wird empfohlen, für Transport und Transfer mindestens vier Personen einzusetzen, um die Möglichkeiten eines Unfalls oder von Verletzungen zu minimieren. Nicht empfohlen, wenn die Wirbelsäulenstabilität eine Rolle spielt. Die unsachgemäße Handhabung oder Nutzung eines beschädigten QuikLitter™ Lite kann zum Tod oder schweren Verletzungen führen. Bitte befolgen Sie alle Anweisungen.

## KONTRAINDIKATIONEN UND WARNHINWEISE

- Verwenden Sie den QuikLitter™ Lite nicht, wenn das Gerät übermäßig abgenutzt oder durchlöchert ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Objekten.
- Vermeiden Sie das Ziehen des QuikLitter™ Lite über raue Oberflächen.
- Lagern Sie den QuikLitter™ Lite nicht in Kontakt mit Wärmequellen von mehr als 88°C.
- Nicht zu verwenden in Verbindung mit sonstigen mechanischen Hebevorrichtungen mit vertikaler oder horizontaler Bewegung.

## PATIENTENTRANSPORT

- Überschreiten Sie nicht die Tragfähigkeit von 340 kg.
- Patienten mit mindestens 4 Personen heben.
- Stellen Sie eine geeignete Grifftechnik sicher, bevor Sie den Patienten anheben.

## REINIGUNG

- Wenn verschmutzt, kann die QuikLitter™ Lite mit einem feuchten Tuch mit Seife, Waschmittel oder einem milden Desinfektionsmittel gereinigt werden.
- Nicht in der Waschmaschine waschen.
- Wenn das gesamte Gerät kontaminiert ist, legen Sie es in einen roten Risikoabfallsack und entsorgen Sie es entsprechend Ihres Protokolls für Gefahrstoffabfälle.
- Vermeiden Sie den Einsatz von scharfen Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln.

## VORGESEHENE NUTZUNG

Die QuikLitter™ Lite ist für den Einsatz durch medizinisches Fachpersonal für die allgemeine Patientenstabilisierung, Transport und Transfer gedacht. Aufgrund des leichten Gewichts und der kompakten Bauweise des Rettungs-/Tragetuch eignet es sich besonders für harte Umgebungen, in denen eine schnelle Evakuierung notwendig ist.

*Hinweis: Jeder schwere Zwischenfall, der sich in Bezug auf dieses Rettungs-/Tragetuch ereignet, sollte an Tri-Tech Forensics und die zuständige Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Nutzer und/oder der Patient ansässig sind, gemeldet werden.*

 Medizinprodukt	 EC REP	 Bevollmächtigter in der europäischen Gemeinschaft	 LOT	 Fertigungslos -nummer	 Länder -Code	 Importeur
 Enthält kein Naturkautschuk-latex	 Hersteller	 Gebrauchsanweisung beachten	 Herstellungsdatum			

**RESCUE ESSENTIALS**

[www.rescue-essentials.com](http://www.rescue-essentials.com)

910-830-0286 | [info@rescue-essentials.com](mailto:info@rescue-essentials.com)